



サンパーフェクトケア

指定医薬部外品

コンタクトレンズ装着薬

しっとりフィットS


販売名:CM フィットM

効能効果


ハードコンタクトレンズまたはソフトコンタクトレンズの装着を容易にします。

用法・用量

本剤の1~3滴でコンタクトレンズの両面をぬらして装着してください。

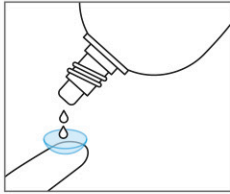

レンズに直接液を落とす

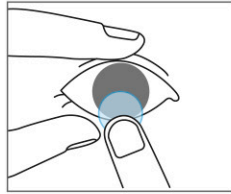

そのままレンズを装着する

成分

<有効成分> ポリビニルアルコール、ヒプロメロース、塩化ナトリウム、タウリン、L-アスパラギン酸カリウム

<添加物> ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、D-ソルビトール、塩酸ポリヘキサニド

使用上の注意

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - ①医師の治療を受けている人
 - ②本人または家族がアレルギー体質の人
 - ③薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - ④目にはげしい痛みのある人
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 使用に際しては、添付の使用説明書をよく読んでください。
- 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。



made in kyoto



サンコンコンタクトレンズ

www.sun-con.com

本社 〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上る475
TEL.075-221-6861

仙台・東京・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・四国・福岡

指定医薬部外品

コンタクトレンズ装着薬



サンパーフェクトケア

瞳にもっとやさしさを

しっとり フィットS

タウリン・アスパラギン酸配合

すべての
コンタクトレンズに
使えます
「ハード・ソフト用」



BAKフリー

15mL




サンコンコンタクトレンズ

www.sun-con.com

※1ml中に0.1gのタウリン含有

涙液の蒸発やレンズへの 汚れの付着を軽減し、 コンタクトレンズを快適に 装用できます。

瞳のために、もっとやさしくなりました

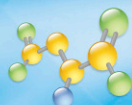

角膜に栄養を与えるアミノ酸成分を
ダブルで配合



水分の蒸発を防ぎ、角膜を保護します
(コンドロイチン)

BAK
フリー

瞳にやさしい防腐剤を使用しています
(塩酸ポリヘキサニド)

装着時も装用中も快適に

しっとりフィットSの
うるおい成分
ポリビニルアルコール
ヒプロメロース

汚れ

水分
保持

水分
蒸発

コンタクトレンズ

- 1 ゴロゴロしない**
うるおい成分のクッション
効果でレンズ装着時の
異物感を軽減します。
- 2 水分を保持して
汚れをブロック**
うるおい成分がレンズを
包んで、汚れの付着や水
分の蒸発を防ぎます。

レンズによる異物感・乾燥感を軽減

うるおい成分¹⁾により、レンズ装着時の異物感や刺激、
装用中の乾燥感をおさえます。

1) ポリビニルアルコール、ヒプロメロース

レンズの汚れを軽減

涙液中のタンパクなどの汚れがレンズに付着するのを
おさえる成分が配合されています。

すべてのレンズに使用可能

すべてのハードレンズ、ソフトレンズ、定期交換レンズ、
1日使い捨てレンズに使用できます。

このような方におすすめ

ハードレンズの場合

- 装着時に異物感がある
- くもりやすく、乾燥感がある
- 汚れがつきやすい
- 装着感を改善したい

ソフトレンズの場合

- 乾燥しやすく、装着感が悪い
- 目薬を頻繁に使用している
- はりつき感がある
- 圧迫感がある
- 汚れやすい

