

# SOFT SUPPORT



### 【お問い合わせ先一覧】

営業所

- 東 京 〒101 東京都千代田区岩本町3丁目3番2号 (アックス神田ビル4F)  
TEL (03) 3865-3061 (代表)
- 京 都 〒600 京都市下京区七条通東洞院東入ル (第一キョートビル7F)  
TEL (075) 351-1241 (代表)
- 大 阪 〒530 大阪市北区曽根崎2丁目15番29号 (東海ビル8F)  
TEL (06) 315-8861 (代表)
- 神 戸 〒650 神戸市中央区多聞通2丁目4番4号 (ブックローン神戸ビル7F)  
TEL (078) 371-6521 (代表)
- 広 島 〒732 広島市南区的場町1丁目3番 (広島の場ビル8F)  
TEL (082) 261-3901 (代表)
- 福 岡 〒812 福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号 (日本団体生命福岡ビル10F)  
TEL (092) 481-2761 (代表)

株式会社 **サンコンタクトレンズ**

本 社 〒604 京都市中京区麩屋町通夷川上ル475  
(サンコンビル)  
TEL (075) 221-6861 (代表)

ソフト&ハードコンタクトレンズ用  
酵素洗剤

# SOFT SUPPORT

ソフトサポート


簡単しかも高性能  
つけおきタイプのケアシステム



NET.4ml 1,800円  
(消費税抜き価格)



汚れたソフトレンズ

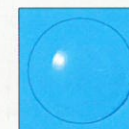

ソフトサポートで  
処理後のソフトレンズ



**サンコンタクトレンズ**

## ソフトサポート

## 装着サイクル

ソフトサポートは次の各社のレンズにも使用できます。

- 特長1** 洗浄力がさらにアップしました。  
 レンズをはずしてただつけるだけ。  
 酵素の洗浄力をパワーアップさせたことにより、汚れ落としの効果が一段と高まりました。
- 特長2** 常にきれいな状態でレンズが使用できます。  
 毎日のつけおきクリーニングによって、汚れの蓄積を防ぎ、レンズはいつも清潔な状態を保ちます。
- 特長3** ソフトコンタクトレンズのケアに最適です。  
 毎日のこすり洗いや週1回のタンパク除去処理が不要。そのうえ、専用希釈液のいらぬタイプですので、レンズのケアがずっと簡単になりました。

## (使用方法)

- ① レンズ保存ケースの右側(R)、左側(L)にソフトサポートを1滴ずつ入れます。
- ② そこにソフトコンタクトレンズ保存液をレンズケースの8~9分目まで入れます。(ハードコンタクトレンズに使用するとき、ハードレンズ用洗浄保存液。ニューケアマイルドを入れます)
- ③ はずしたレンズをソフトコンタクトレンズ保存液で軽くすすいでから、レンズケースに入れ、レンズを液中に沈めてからキャップを締めます。
- ④ レンズケースを煮沸消毒器にセットし、レンズの消毒と洗浄をします。(ハードコンタクトレンズの場合は、煮沸消毒をしないでください)
- ⑤ レンズをケースから取り出し、ソフトコンタクトレンズ保存液でよくすすいでから装着します。
- ⑥ 使用後の液はすべて捨て、レンズケースは水道水できれいに洗い、清潔に保ちます。

※ハードコンタクトレンズに使用する場合は①~③の手順のあと翌日の装着時まで保存ケース内に放置し、レンズを水道水でよくすすいでから装着します。

※ニューケアマイルドは、ハードコンタクトレンズ用ですので、ソフトコンタクトレンズには使用できません。



ソフトサポートを使ったソフトコンタクトレンズの装着サイクルです。このサイクルを規則正しく守って装着してください。

## (使用上の注意) &lt;点眼厳禁&gt;

- ※ソフトサポートによるクリーニングシステムは、毎日行ってください。
- ※ソフトサポートは必ず1滴でご使用ください。濃厚液を洗浄使用すると、レンズの異常の原因になることがあります。
- ※保存ケースにソフト用保存液を入れられない状態でレンズとソフトサポートを入れまると、ソフトレンズがカールすることがあります。その時は、ソフト用保存液を入れてからキャップを締め、軽く振ってしばらく置きますと、元に戻ります。必ず使用方法の順序でご使用ください。
- ※ソフトサポートをハードコンタクトレンズに使用する場合は、加熱をしてはいけません。
- ※洗浄後の液は再使用できません。使用後の液は必ず捨て毎日入れ替えてください。
- ※ソフトサポートで処理したレンズはそのまま眼にいれてはいけません。必ずソフト用保存液でよくすすいだ後に、装着してください。(水道水を使用しないでください。鉄分付着の原因になります)
- ※ソフトサポートの使用後は容器のキャップをしっかりと締め、直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- ※とくに汚れのひどい時は、クリーナーで軽くこすり洗いしていただく効果的です。
- ※小児の手の届かないところに保管してください。
- ※内服、点眼は絶対にしないでください。誤って眼に入った場合は、すぐに水道水でよく洗い流してください。
- ※ソフトサポートが衣服についた場合、ついた箇所を水でよくすすぎ、そのうえ洗たくやクリーニングをしてください。
- ※万一、眼に異常を感じた場合は使用を中止し、眼科医に相談してください。

## ソフトコンタクトレンズ一覧

メーカー名	レンズ名
ボシュロム・ジャパン(株)	・オプティマ38 ・オプティマEX ・EX-035 ・B&Lソフトレンズ ・オプティマ・トーリック ・メダリスト
(株)クラレ	・スタンダード ・ゼロ6 ・ファシル
セイコーコンタクトレンズ(株)	・セイコーソフトCS1 ・セイコーソフトCS1EX
東レ(株)	・プレスオー
(株)メニコン	・メニコンソフトMA ・メニコンソフト72 ・メニコンソフトS
(株)日本コンタクトレンズ	・ニチコンソフト ・ニチコンソフトミュー
(株)シード	・シードBI ・シードGI ・シードSX ・シードハインソフトII
HOYA(株)	・ホーヤソフトBS-1 ・ホーヤソフトT-40 ・ホーヤハイクローAce
旭化成アイミー(株)	・アイミーソフトカリブ ・アイミースーパーソフト ・アイミーソフトS
(株)レインボーオプテカル研究所	・レインボーゼロ6
キャノン販売(株)	・キャノンライトグリーン ・キャノンデュラソフトカラー(黒、ブラウン系は除く)